



Brukerveiledning

Den unike, brukervennlige designen til Vortefri PEN gjør behandling av vorter og fotvorter svært praktisk.

Så enkelt er det:

1.
Fjern den barnesikre korken (Se også etiketten på pennen).

2.
Trykk tuppen av pennen forsiktig mot vorten i ett sekund og gjenta én gang.

Ferdig! Behandles en gang i uken til vorten er helt borte.

Hver pennapplikator inneholder en svamp som er fylt med nok Vortefri-løsning til 30 applikasjoner. Svampen er festet til spissen og er utformet for automatisk å kunne gi den riktige dosen til vorten. Det ergonomiske, trekantformede håndtaket gjør pennen enkel å bruke og det sikrer en presis påføring.

Vortefri PEN kan brukes av hele familien, men når man behandler barn med løsningen, må den alltid påføres av en voksen.

Les mer om behandling av barn under 4 år.

Oppbevar alltid applikatorpennen utenfor syns- og rekkevidde for barn.

Behandling av fotvorter eller en gammel/hard vorte

Før behandling av fotvorter (verrukas) eller vorter som er gamle og /eller harde, bør du bløtgjøre dem i varmt vann til

huden er myk. Bruk pinsett for å skrape av huden på toppen av vorten. For tykk hud på innovervoksende fotvorter (verrukas), bør du fjerne den harde huden forsiktig.

[Last ned fullstendige instruksjoner for bruk her.](#)

MERK! Følg doserings- og applikasjonsinstruksjonene nøye ettersom løsningen er etsende. Ikke bruk VorteFri PEN til å fjerne ansikts- eller kjønnsvorter, mollusker eller andre hudforandringer. Diabetikere bør kun bruke pennen på sunn hud som ikke er berørt av tilstander som er forårsaket av diabetes.

Hvor kan jeg kjøpe Vortefri?

Vortefri kjøper du raskt og enkelt på ditt nærmeste apotek enten i butikk eller på nett

Symptomer på vorter

Vortesymptomer kan variere i stor grad. Hva er de vanligste tegnene?